

Klamydia ja gc- (tippuri) näytteen siirtäminen kuljetusputkeen

Pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota kontaminaation estämiseen siirrettäessä näytettä APTIMA® Urine Specimen tai APTIMA® Swab Specimen -kuljetusputkeen.

1. Virtsanäytepakkauksen kertakäyttöpipettiä ei saa poistaa paketista koskemalla sen kärkiosaan.
2. Foliopintaisiin korkinosiin ei saa koskea.
3. Näyteputkien korkkeja ei saa laskea likaiselle työskentelypinnalle foliopuoli alaspäin, koska näyte voi kontaminoitua.
4. Näytteet pitää aina käsitellä yksi näyte kerrallaan kertakäyttökäsineet kädessä. Käsineet on vaihdettava jokaisen näytteen välissä. Näin voidaan vähentää näytteestä toiseen tapahtuvan kontaminaation riskiä.

