

## Veriviljelypullojen tarroittaminen

---

Numeroi pulloihin näytteiden ottojärjestys tussilla tai tarralla. Tällöin vastaukseen voidaan liittää lausunto, mitkä pulloet kasvavat.

1. Aerobipullo
2. Anaerobipullo
3. Aerobipullo
4. Anaerobipullo

Jos veriviljelynäytteet otetaan samanaikaisesti sekä suonesta että subclaviakanyylista, kaksi ensimmäistä pulloa otetaan suonesta, kaksi jälkimmäistä subclaviakanyylista (näytetarraan tussilla merkintä kanyylinäytteestä). Näihin näytteisiin ei tarvitse merkitä ottojärjestystä.

Näytetarroja tulostuu samalla näytenumerolla kaksi kutakin pyyntöä kohti. Toisen pyyntönumeron tarrat liimataan pulloihin 1. ja 2., toisen pulloihin 3. ja 4. Liimaa näytetarra viivakoodi pystyyn, pulloarran valkoisen osan reunaan viivakoodikohdan päälle.

1.pullopari: sama pyyntönumero    2. pullopari:sama pyyntönumero



Kaksi paria numeroituja veriviljelypulloja oikeassa näytteenottojärjestyksessä vasemmalta oikealle

Keltakorkkinen lasten veriviljelypullo

Tarkistathan vielä, että:

- Kuhunkin pulloon on kiinnitetty ainoastaan yksi pyyntöviivakooditarra (myös lasten keltaiseen pulloon, toisen saa hävittää tarpeettomana)
- Pyyntöviivakooditarra on pystysuorassa
- Pyyntöviivakooditarra ei jää ryppyyn
- Pyyntöviivakooditarra ei peitä
  - o nestepinnan ikkunaa
  - o eränumeroa
  - o pullon vanhenemispäivämäärää (valkoinen teksti mustalla pohjalla)
  - o pullon 2D-viivakoodia

## Yhteystiedot

Laboratorio

Ajanvaraus maanantaista perjantaihin kello 10.00–15.00

Puhelin 02 627 6410

SataDiag

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)