

## Mykobakteerinäytteiden laboratoriotutkimukset -näytteiden tilaus- ja pakkausohje

### Näytteenotto- ja tilausohjeet:

- **17411 MbViVr Mykobakteeri, viljely ja värjäystutkimukset**

#### Tilausnumerot:

8569 TbVrVi, Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely, muu näyte

8578 Ex-TbVrVi, Tuberkuloosibakteeri, värjäys ja viljely, ysköksestä

4438 B-TbEVi, Mycobacterium, erikoisviljely, verestä

8800 Bm-TbEVi, Mycobacterium, erikoisviljely, luuytimeistä

17948 F-TbVi, Tuberkuloosibakteeri, viljely, ulosteesta

184 U-TbVi, Tuberkuloosibakteeri, viljely, virtsasta

- **4490 TbNhO**
- **17410 TbNhOKiire**

**Näytteet otetaan ja pakataan osaston henkilökunnan toimesta ja toimitetaan laboratorioon.**

### **Nestemäisille näytteille käytetään ainoastaan tiiviitä kierrekorkillisia astioita**

Näytekuljetuslaatikon päälle tulee merkitä selkeästi "INFEKTIOHÄLYTYS". Merkinnän avulla näyte avataan vastaanottavassa laboratoriossa turvallisesti.

HUOM! Näytteenoton jälkeen ota suojakäsineet pois, desinfioi kädet ja laita puhtaat suojakäsineet. Puhdista näyteputki desinfektioaineella (Easydes/Apowipe) Pakkaa näytteet tämän ohjeen mukaan.


### Näytteenottoastiat: Yskös

Sarstedtin keltakorkillinen 50 ml purkki tai valkokorkkinen 60 ml purkki (OSTi-numero 560810)



### Näytteenottoastiat: Nestemäiset näytteet (esim. bronkuslima, BAL)

50 ml:n polypropyleeniputki (Falcon, Sarstedt) näytettä mahdollisuuksien mukaan 45 ml:aan asti

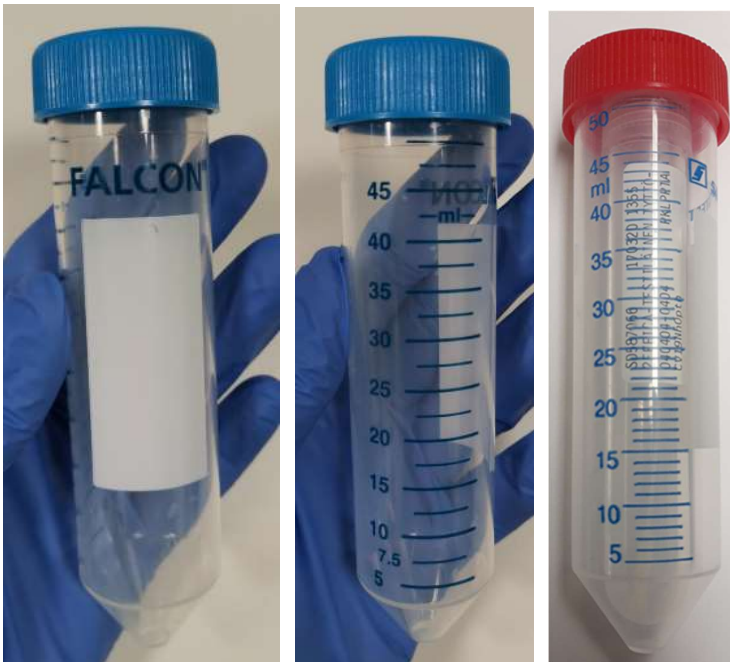

### Näytteenottoastiat: Ei-nestemäiset näytteet (esim uloste)

Kierrekorkillinen, tiivis purkki tai 50 ml:n polypropyleeniputki

### Näytteenottoastiat: Muut näytteet

Kudos- tai luunäyte: Kuiva putki. Näytteen minimikoko 3x3 mm

Veri- ja luuydinäyte: mykobakteeriviljelypullo tilataan etukäteen HUSLabin näytteiden vastaanotosta [huslabnvo@hus.fi](mailto:huslabnvo@hus.fi)

**HUOM!** Jos näytteitä ei pystytä lähettämään saman vuorokauden aikana, säilytä näytteet jääkaapissa (+4 °C).

## Mykobakteerinäytteiden pakkausohje

Näyte pakataan infektiotaarallisen näytteen tavoin.

1. Näyteastia suljetaan tiiviisti ja siihen liimataan potilastarra
2. Märkänäytteen näyteastia kääritään sellupaperiin
3. Selluun kääritty näyteastia laitetaan minigrip-pussiin. Pussi suljetaan huolellisesti
4. Uuden minigrip-pussin päälle liimataan infektiöhälytys-tarra ja pussin sisälle tiputetaan ensimmäisen näytepussin kanssa toinen näydetarra. tarraa ei irroteta taustasta. Pyyntötarra ja näyteastia eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa.

