

## NÄYTTEENOTTO APTIMA HPV-TESTIÄ VARTEN (HPVNho)

### Tarvittavat välineet

1. Aptima HPV näytteenotto – setti
2. Nimitarra ja muovipussi


### Näytteenotto

1. Poista ylimääräinen lima kohdunsuulta käyttäen valkovartista puhdistustikkua. Puhdistukseen voit käyttää myös muuta leveäkärkistä tikkua
2. **Hävitä puhdistustikku** (Kuva 1)
3. Aseta sinivartinen näytteenottotikku kohdunkaulankanavaan (Kuva 2)
4. Pyöräytä tikkua kolme täyttä kierrosta, jotta saat edustavan näytteen
5. Poista tikku varovasti
6. Avaa kuljetusputken korkki ja aseta tikku kuljetusputkeen
7. Tartu kiinni peukalo-etusormiotteella tikun varresta ja pyöräytä kolme kierrosta, jolloin solut irtoavat nesteeseen (Kuva 3)
8. **Hävitä näytteenottotikku** (Kuva 4)
9. Sulje kuljetusputken korkki tiiviisti (Kuva 5)
10. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika nimitarraan**
11. Kiinnitä nimitarra **pystysuoraan** näytepurkkiin
12. Laita näytepurkki muovipussiin
13. Lähetä näyte kliinisen mikrobiologian laboratorioon (M900)
14. Säilytä kuljetusputki tarvittaessa +2 °C - +30 °C:ssa korkeintaan 60 vrk

Näytteenottovälineitä voit tilata logistiikkakeskuksesta tilausnumerolla 977128. Pienin tilattava määrä on 50 putkea. Välineiden toimitusaika on noin 1viikko.



Kuva 1

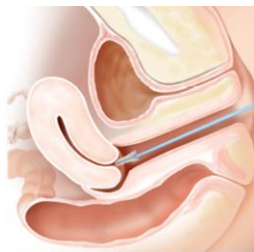

Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5