


## STRECK Cell-Free DNA BCT-putkien säilytys- ja käyttöohje

Putket sisältävät säilytysliuosta, joka stabiloi soluvapaata DNA:ta ja estää tumallisia soluja hajoamasta.

1. Tyhjät näytteenottoputket tulee säilyttää huoneenlämmössä. Putket eivät saa jäätä. Putki tulee ottaa täyteen (10 ml).
2. Jos NIPT-näytteenoton yhteydessä otetaan muita näytteitä, ennen BCT-putkea suositellaan otettavaksi välissä yksi EDTA-veriputki. Glykolyyttisiä inhibiittoreita sisältävät putket (fluoridioksalaatti) otetaan vasta BCT-putkien jälkeen.
3. Kun näyte on otettu, veri ja säilytysliuos sekoitetaan kääntelemällä putkea **10 kertaa** (kts. kuva) tai asettamalla sekoittajaan.

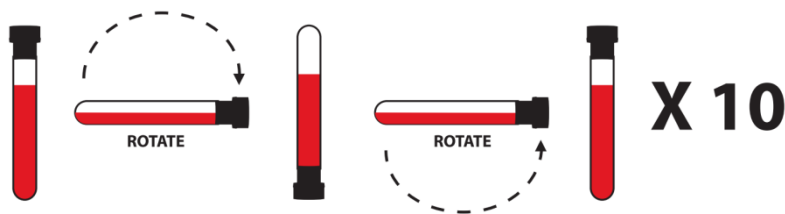

4. Kun näyte on otettu, putki säilytetään huoneenlämmössä.
5. Putket tulee toimittaa laboratorioon **huoneenlämmössä viiden päivän sisällä** näytteenotosta. Näytteitä sisältävien postipakettien päälle tulee lisätä merkinnät ”**kiireellinen**” ja ”**säilytettävä huoneenlämmössä**”.
6. **HUOM!** BCT-putkien kuljetukseen ei saa käyttää putkipostia.

Tiedustelut: laboratorio p. 02-313 7475 tai 02-313 7476