

## PROVTAGNING FÖR APTIMA HPV-TEST (HPVNhO, 4075)


### Förnödenheter

1. Aptima HPV-provtagningsset
2. Plastpåse och namndekal

### Provtagning

1. Torka av överflödigt slem från livmodermunnen med en vitskaftad rengöringspinne. Du kan också använda annan lämplig bredspetsig pinne för detta.
2. **Kassera rengöringspinnen** (figur 1).
3. Placera den blåskaftade provtagningspinnen i livmoderhalsen (figur 2).
4. Roter pinnen tre fulla varv för att få ett representativt prov.
5. Avlägsna pinnen försiktigt.
6. Avlägsna korken från transportröret och placera pinnen i transportröret.
7. Grip tag om pinnens skaft med tumme och pekfinger och rotera tre varv för att lösgöra celler från pinnen i vätskan (figur 3).
8. **Kassera provtagningspinnen** (figur 4).
9. Tillslut transportröret ordentligt med korken (Figur 5).
10. **Skriv patientens namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslag på namndekalen.**
11. Fäst namndekalen **vertikalt** på provburken.
12. Lägg burken med provet i plastpåsen
13. Leverera provet till avdelning M900 (klinisk mikrobiologi).
14. Förvara transportröret vid behov vid +2 °C - +30 °C i högst 60 dygn.

Du kan beställa provtagningsförförnödenheter från logistikcentret (beställningsnummer 977128). Minsta beställning är 50 rör. Leveranstiden för beställda förförnödenheter är c. en vecka.

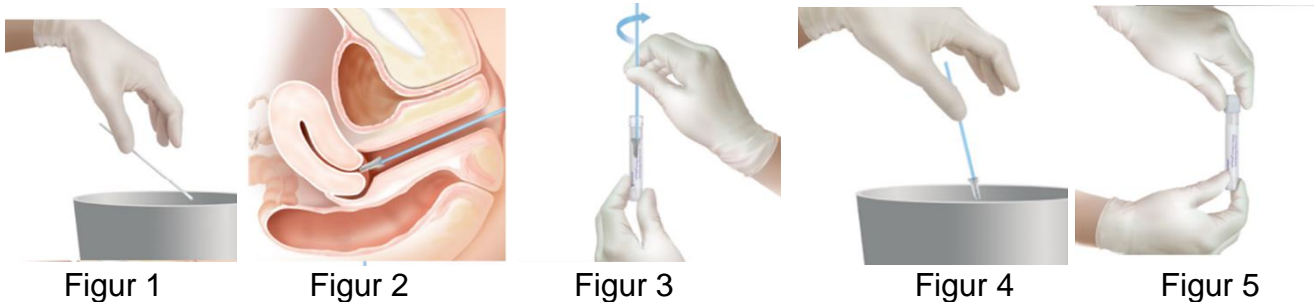

Granskad 3.9.2019 KR-J