
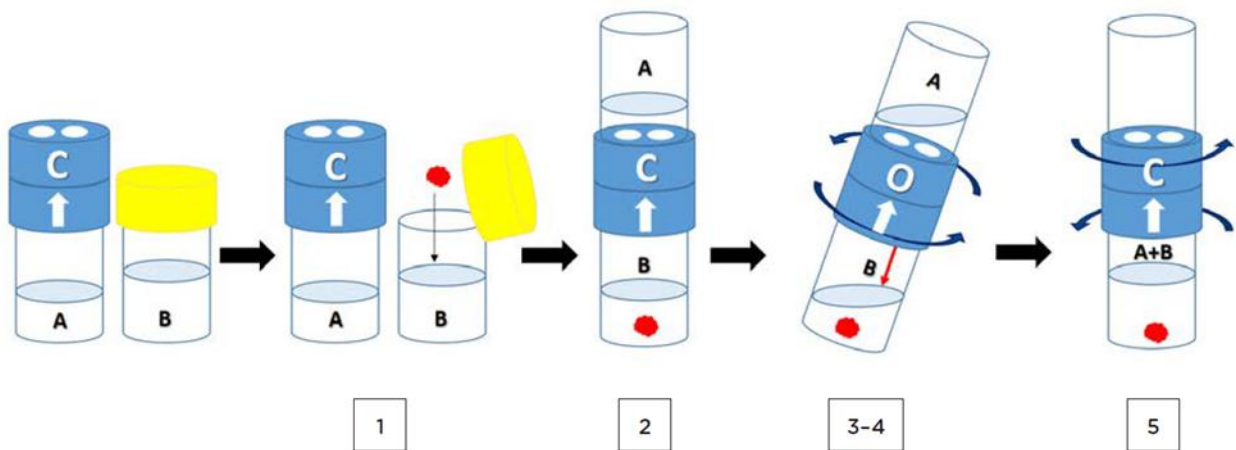


Formaliiniturvapurkkien käyttö (Bio-Optica Klessidra 2.0)

Patologian laboratorio on ottanut käyttöön Bio-Optican Klessidra 2.0 formaliiniturvapurkit nk. puskuripurkki. Tässä ohjeessa opastetaan niiden turvallinen käyttö.

Bio-Optica Klessidrapurkki 2.0 turvakannella			
	Käyttö	Koko	Huomioitavaa
	Histologisille näytteille Esim. paksuneulabiopsianäytteille, luomille, yms.	10 ml formaliinia 35 ml:n turvapurkissa + puskuri 20 ml Fiksaatioliuosta tulee olla kymmenkertainen määrä näytteen tilavuuteen nähden.	Nk. puskuripurkki a. Puskuria sisältävässä purkissa on keltainen kansi b. Formaliinia sisältävässä purkissa on sininen kansi



Kuva 1. Turvapurkin käyttö – pikaohje

Yhteystiedot

Patologian laboratorio
 Maanantaista perjantaihin kello 7–15
 Puhelin 02 627 7354

SataDiag

[SataDiagin verkkosivut löytyvät osoitteesta www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi)

Ammattilaisohje, Patologian laboratorio, 2020



1. Laita otettu kudoksenäyte puskuria sisältävää purkkiin (**keltainen korkki**)
 - a. huuhtelee biopsia-näytteenottoneula puskurissa B
2. Puskuriliuospurkki yhdistetään formaldehyditurvapurkkiin A
3. Yhdistä purkit **pitämällä kiinni sinisestä korkista** ja samalla kiertämällä
4. Tarkista, että korkin nuoli **↑** osoittaa korkissa olevaa kirjainta **C** (close)

Huom! Kierrä vain sinisistä korkeista. Turvapurkkia ei saa avata.



1. Kierrä turvapurkin (A) sinistä korkkia vastapäivään, kunnes nuoli **↑** osoittaa kirjainta **O** (open)

Huom! Kierrä vain sinisistä korkeista. Turvapurkkia ei saa avata.



1. Kallista purkkia hieman, jotta formaliini pääsee valumaan suljetusti ala-astiaan näytteen päälle
2. Nuoli **↑** osoittaa koko ajan kirjainta **O** (open)
3. Varmista, että **KAIKKI** formalini on valunut näytteen päälle



1. Sulje turvapurkki kiertämällä korkkia myötäpäivään, kunnes nuoli **↑** osoittaa kirjainta **C**
2. Tarkista, että
 - a. näyte ei ole kuivassa purkissa
 - b. kaikki formalini on valunut ala-astiaan
 - c. korkki on kiinni, eli nuoli osoittaa kirjainta C
3. Kiinnitä potilaan nimitarra pystysuoraan
4. Kiinnitä nimitarra VAIN alimpaan purkkiin
5. Näyte on valmis kuljetettavaksi
6. Turvapurkit tulee kuljettaa **pystyasennossa**

Huomioitavaa!

1. Tarkista, että näyte on formaliinissa
2. Tarkista, että lähetät laboratorioon vain yhdistetyt purkit (A + B)
3. Tarkista, että potilaan nimitarra on pystysuunnassa