

Hengityksensuojaimen pukeminen

Hengityksensuojaimen pukemisohje

- 

1 Muotoile nenäpehmuste taivuttamalla keskikohdasta varovasti. Avaa alaosa niin, että suojaimesta tulee kuppimainen.
- 

2 Käännä hengityksensuojain siten, että nauhat roikkuvat alaspäin.
- 

3 Aseta hengityksensuojain kasvoille ja vedä kiinnitysnauhat pään yli.
- 

4 Laita alempi nauha korvien alapuolelle ja ylempi nauha pääläelle. Säädä ylä- ja alaosan istuvuus.
- 

5 Muotoile molemmilla käsillä nenäpehmuste tiiviisti nenän muotoon.
- 

6 Tarkasta hengityksensuojaimen tiiviyttä hengittämällä sisään voimakkaasti. Jos tunnet ilmavirtausta nenän ympärillä, muotoile nenäpehmustetta uudelleen. Jos tunnet ilman virtausta muualta suojaimen reunolta, asettele nauhat uudelleen.

FINA2023/07/24/95

Lähde: THL