

Testitulosta ei pidä ilman varmistusmääriä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla potilaalle sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia vaikutuksia. Jos läheteessä on pyydetty, seulonnassa positiivisen tuloksen saanut näyte toimitetaan laboratorion suoraan varmistusanalyysiin.

Jos läheteeseen ei ole merkitty varmistuspyyntöä, positiivisia näytteitä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna yksi kuukausi, jonka aikana tutkimuksen tilaaja voi tehdä erillisen varmistuspyynnön soittamalla laboratorioon.

Potilaan nimi:	Pyytävä yksikkö:
Henkilötunnus:	
Näyttenumero (U-Huum-O):	
Näytteenotto päivämäärä:	Analysointipäivämäärä:
Analyysin suorittaja:	

Näytteen manipuloinnin tarkistus:

pH (norm. = 4.5 - 8.0)	Ominaispaino (norm. = 1.005 - 1.035)	Väri (norm. = kellertävä)	Epäily manipuloinnista

Testi	Testin tulos	Huume- /lääkeryhmä	Aine	Testin herkkyys (alaraja) ng/ml
AMP		amfetamiini	amfetamiini, d-amfetamiinisulfaatti	500
BUP		buprenorfiini	bubrenorfiini	10
BZD		bentsodiatsepiinit	diatsepaami, oksatsepaami, alprazolaami, bromatsepaami, klonatsepaami (yli 3mg päiväännoksella)	200
COC		kokaiini	bentsoyyliekgoniini kokaiini hydrokloridi	300
MET		metamfetamiini	metamfetamiini, efedriini, MDMA, pseudoefedriini	500
MTD		metadoni	metadoni, levomepromaziini	300
OPI		opiaatit	morfiini, kodeiini, heroini, D-pseudoefedriini HCL	300
TCA		trisykliset antidepressantit	doksepiini, nortriptyliini, trimipramiini	1000
THC		kannabis	11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH dronapinoli, efavirenz, joskus myös pantopratsoli	50
TML		tramadoli	tramadoli, cis-tramadoli, desvenlafaxiini	100

Näyte toimitettu varmistusanalyysiin _____ (pvm, tekijä)