

Primed Optilene – Pleuradreenipussin käyttöohje

Pussia käytetään rintaontelon tyhjennyksen yhteydessä pleuradreenin päähän kytkettynä, joko ilman tai nesteen tyhjennykseen.

Pussissa on sininen varoventtiili, jonka tulisi aktivoitua automaattisesti pussin täyttyessä liiaksi ilmalla. Mikäli pussi on täynnä ilmaa, voidaan sininen varoventtiili aktivoida manuaalisesti nostamalla se yläasentoon. Normaali tilanteessa venttiiliin ei ole tarvetta kajota.

Valkoinen venttiili päästää ilman automaattisesti pussista ulos. Mikäli valkoinen venttiili kostuu eritteestä tai ilmavuoto keuhkosta on runsasta, ei venttiilin teho riitä ilman ulospääsemiseen. Tästä syystä varotoimenpiteenä puhkaistaan valkoinen venttiilikalvo aina pussin asennuksen yhteydessä tämän ohjeen mukaisesti.



Kuva 1. Primed Optiline pleuran tyhjennyspussi.



Kuva 2. Valkoinen venttiili voidaan rikkoa terävällä esineellä tai käyttämällä pussin laskuputken päätä.