

VIRTSANÄYTEPUTKIEN TARROITUSOHJE

Yleistä putkien tarroituksesta

- Näytetarrojen viivakoodien on oltava hyvälaatuisia, analysaattori ei pysty lukemaan huonolaatuista viivakoodia.
- Viivakooditarra on liimattava pystysuoraan ja korkin lähelle.
- Näytteen nestepintaa ei saa peittää tarralla.
- Jokaisessa putkessa on oltava tarra, jossa lukee potilaan nimi ja henkilötunnus, sekä näytteenottoaika
- Jokaista yhdistelmäutkimusta varten on pyrittävä ottamaan oma putki

Mikäli ei saada näytettä kahteen 10 ml:n putkeen, on suositeltavampaa ottaa 1x10 ml putki, kuin 2x4ml:n putket.

Pienistä putkista ei voida tehdä mikroskoopissa lisätarkistuksia, sen vuoksi niitä käytetään vain, kun on aivan pakko.

Jos saisit otettua 2 kpl 4ml:n putkea, ota mieluummin 1 x10ml:n putki.



Kuva 1. Ideaalitilanne: 2 x 10 ml putki



Kuva 2. Jos näytettä on niukasti: Liimataan yksi tutkimustarra putkeen kiinni, toinen tarra laitetaan putken kanssa minigrip pussiin.



Kuva 3. Jos näytettä on hyvin niukasti, kaikkia tutkimuksia ei välttämättä voida tehdä.



Kuva 4. Tilanne, kun näytettä on erittäin niukasti. **Huom! Toimitettava nopeasti laboratorioon. Ei saa jättää luukulle, tutkimusten säilymisaika hyvin lyhyt, toimita hoitajalle käteen asti.**



Kuva 5. Mikäli minigrip pussia ei ole saatavilla tms. ja joudut laittamaan kaksi tutkimustarraa samaan putkeen. Liimaa alempi tarra suoraan, mahdollisimman ylös. Toinen vinoon ensimmäisen tarran viivakoodin päälle. Näin kumpikaan tarroista ei jää huomaamatta!

Yhteystiedot

Laboratorio

Palvelunumero 044 707 9761

Arkisin kello 7.00 – 14.00

<https://www.sata.fi>