

VIRTSANÄYTTEEN OTTAMINEN CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE NhO, U-CtGcNhO (4816) -TUTKIMUSTA VARTEN

Näytteen ajoitus ja potilaan esivalmistelu

Ennen näytteenottoa potilaan pitää olla virtsaamatta ainakin 1 tunti.

Polikliinisen potilaan näytteen antaminen voidaan toteuttaa kotona, jos potilasta opastetaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Ohjeet löytyvät Hoito-ohjeet.fi internet-sivuilta.

Näytteenotto

Pesua ei saa suorittaa! **Näytteeksi otetaan virtsasuihkun alkuosa, noin 20–30 ml** kertakäyttöiseen näyteastiaan. Oikean määrän saamiseksi on purkkiin merkittävä tussilla viiva 25 ml kohdalle ennen näytteenottoa. Suurempi määrä laimentaa näytettä ja voi vähentää tutkimuksen herkkyyttä. Vähimmäismäärä on 10 ml. Loppu virtsa lasketaan WC-pyttyyn.

HUOM. U-KemSeul ja U-CtGcNhO -virtsanäytteitä ei saa ottaa samaan näyteastiaan!



Näytteen siirtäminen Alinity m multi-Collect kuljetusputkeen

1. Näytteitä siirrettäessä on varottava kontaminaatiota näytteestä toiseen. Jos näytettä joutuu käsineille, vaihda ne.
2. Avaa putken korkki. Kuljetusputki sisältää säilytysnestettä, jota ei saa heittää pois.
3. **Siirrä putkeen 2 ml virtsaa** pakkauksessa olevalla kertakäyttöisellä pipetillä. Määrä on oikea, kun nestepinta asettuu putken valkoisessa etiketissä olevan ikkunan kohdalle.
4. Sulje korkki tiiviisti. Älä vaurioita oranssia korkkia. Liimaa pyyntötarra pystyyn. **Älä kääntele putkea. Säilytä ja kuljeta pystyasennossa. Älä käytä putkipostia.**

Näytteenottopakkauksia saa tilattua logistiikasta yhden 50 kpl:een erän kerrallaan (Nimike: Alinity m Multi-Collect Specimen Collection Kit, nimiketunnus 957094).

Säilytys ja kuljetus

- voidaan säilyttää väliaikaisesti jääkaapissa tai huoneenlämmössä
- näyte pitää siirtää kuljetusputkeen 24 tunnin kuluessa näytteenotosta
- kuljetusputkeen siirretty näyte säilyy huoneenlämmössä tai jääkaapissa 14 vrk
- toimitetaan SATKS:n kl. mikrobiologian laboratorioon joko keräysastiassa tai kuljetusputkessa

