








## VAKUUMINÄYTTEENOTTOPUTKET VIRTSATUTKIMUKSIIN

TUTKIMUS	PUTKI	KORKKI	HUOM
13039 U –pH-O	 BD (364915) 11 ml Logistiikkakeskus nro 901512 Ei säilöntäainetta	Vaalea beige muovikorkki	Näyte säily huoneenlämmössä 8 h, jääkaapissa 1 vrk.
1940 U -Solut 1941 U-Diffi 1881 U -KemSeul	  BD (364955) 10 ml tai Sarstedt (11.2453.001) 10 ml Logistiikkakeskus nro 988656 Sisältävät säilöntäainetta	Vihertävä muovikorkki	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. Sekoitus x 6. Näyte säily huoneenlämmössä 1 vrk.
1155 U -BaktVi  Jos potilaasta on tilattu samalla kellonlyömällä myös U-Solut ja/ U-Kemseul tulostuu tarra Virtsapak. Liimaa tämä tarra näyteputkeen. Yksi 10 ml putki riittää.	  BD (364955) 10 ml tai Sarstedt (11.2453.001) 10 ml Logistiikkakeskus nro 988656 Sisältävät säilöntäainetta	Vihertävä muovikorkki	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. Sekoitus x 6. Näyte säily huoneenlämmössä 1 vrk. HUOM! Jos näytettä on niukasti, täytä ensisijaisesti pieni 4 ml putki BD (368500).
3777 U-BaktJVi	  BD (364955) 10 ml tai Sarstedt (11.2453.001) 10 ml Logistiikkakeskus nro 988656 Sisältävät säilöntäainetta	Vihertävä muovikorkki	Täyttö vähintään merkkiviivaan asti. Sekoitus x 6. Näyte säily huoneenlämmössä 1 vrk.

Tutkimus 1941 U –Diffi voidaan tehdä vain, jos näyte on 10 ml säilöntäaineellisessä putkessa täytettynä vähintään merkkiviivaan asti.

**JOS VIRTSANÄYTETTÄ ON VÄHÄN (3 ml – 7 ml)**

- Siirrä näyte **pieneen 4 ml säilöntäaineelliseen vihreäkorkkiseen putkeen** siten, että putki täyttyy vähintään minimimerkkiin asti (3 ml) (vakuumisti tai kaatamalla).
- Kiinnitä kaikki pyyntötarrat näyteputkeen ja toimita näyte laboratorioon.
- Laboratoriossa näytteen vastaanottajaa tulee informoida, että näytettä oli vähän ja vaatii siksi erityishuomiota.

**JOS VIRTSANÄYTETTÄ ON ERITTÄIN VÄHÄN (alle 3 ml)**

- Siirrä näyte säilöntäaineettomaan beigekorkkiseen putkeen (4 ml tai 11 ml).
- Kiinnitä kaikki pyyntötarrat näyteputkeen ja toimita näyte laboratorioon **välittömästi**.
- Laboratoriossa näytteen vastaanottajaa tulee informoida, että näytettä oli vähän ja vaatii siksi erityishuomiota.
- Jos näytemäärä on erittäin vähäinen (alle 1 ml), kaikkia haluttuja tutkimuksia ei saada välttämättä tehtyä.



BD (368500), logistiikkakeskus nro 900232, **4 ml säilöntäaineeton virtsan vakuumputki**

BD (368500), 4 ml, säilöntäaineettomaan putkeen otetaan mm. seuraavat virtsanäytteet: U-Amyl (1080), U-CI (2086), U-Gluk (1475), U-K(2004), U-Krea(2145), U-Na (2386), U-Pi(1433), U-Prot(2519), U-Urea(2890) ja U-AlbKrea(4511). Lisätietoa ja tutkimuskohtaiset ohjeet tutkimusohjekirjasta: [www.satadiag.fi](http://www.satadiag.fi) / Laboratorion ohjekirja

Ohje ammattilaiselle, Laboratorio, 2023