


## Hengityssuojaimen pukeminen

(FFP2 tai FFP3) FF=filtering facepiece (suodattava kasvo-osa), P=particle (hiukkaset)

- Noudata aina valmistajan käyttöohjetta (pakkauksessa)
- Tarkista pakkauksesta, että käyttöaika ei ole mennyt umpeen.
- Pidä suojainta kädessä ja vetäen alakappale esiin tee suojaimesta kupin muotoinen.
- Ota kiinnityskuminauhat esiin.
- Laita suojaimen alareuna leuan alle. Vedä molemmat kuminauhat pään yli.
- Aseta alempi nauha niskan taa, korvan alle ja ylempi nauha pääläen yli 45 asteen kulmassa. Säädä ylä- ja alakappaleita, kunnes ne istuvat mukavasti.
- Muotoile nenäpuristin nenän alaosan muotoiseksi molemmilla käsillä. ÄLÄ purista nenäkappaletta pelkästään kahdella sormella nipistämällä, sillä siitä voi seurata suojaimen suorituskyvyn heikkeneminen.

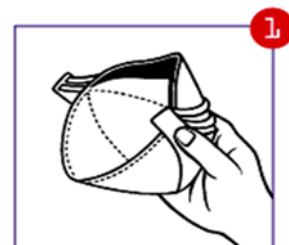

## Suojaimen tiiviys kasvoilla on tarkistettava ennen sen käyttämistä.

- Jos suojaimessa on uloshengitysventtiili, vedä syvään henkeä. Peitä venttiili käsilläsi ja puhalla voimakkaasti. Tunnustele käsilläsi mahdollisia ilmapuotoja sivuilta.
- Jos suojaimessa ei ole uloshengitysventtiiliä, hengitä voimakkaasti. Sisään hengittäessä suojain tulee sisäänpäin. Ulos hengittäessä tunnistat ilmapuodot suojaimen ympärillä.
- Jos tunnet ilmavirran kasvoilla esimerkiksi nenänpielessä tai leuan alla, suojain vuotaa. Asettele suojain paremmin kasvoillesi ja kokeile uudelleen.
- Tarvittaessa vaihda toisen kokoinen tai toisen mallinen hengityksensuojain.

## Hengityssuojaimen riisumisohje



1. Desinfioi kädet  
Anna huuhteen kuivua



2. Pue suojakäsineet



3. Katkaise kuminauhat liitoskohdasta.  
Vältä koskettelemasta suojaimen etuosaa



4. Riisu suojain rauhallisesti ja hallitusti.



5. Laita käytetty hengityssuojain suoraan kannelliseen roska-astiaan.



6. Poista suojakäsineet. Desinfioi kädet.