

Klamydia- ja tippurinäytteenotto kohdunkaulakanavasta (cervix) (1738 CtGcNhO)

Tutkimusta käytetään klamydian ja tippurin aiheuttajabakteerien osoittamiseen kohdunkaulakanavasta.

Tarvittavat välineet:

1. Näytteenottopakkaus (Kuva 1), joka sisältää kuljetusputken, näytteenottotikun sekä pipetin (ALINITY M MULTI-COLLECT SPECIMEN COLLECTION KIT, Tuotekoodi: 09N19-00, Abakus tilausnumero: 957094, pienin toimitettava pakkauskoko: 10 x 50 kpl).
2. Muovipussi ja pyyntötarra.



Kuva 1

Näytteenotto:

HUOM. Näytteenottotikulla EI SAA koskea kuljetusputken nesteeseen ennen cervix-näytteen ottamista.

1. Avaa näytteenottopakkaus. Näytteenottoon tarvittavat pakettissa olevat kuljetusputken ja näytteenottotikun. Pakkauksen sisältämää kertakäyttöpipettiä et tarvitse. Sen voi hävittää.
2. Ota näytetikku varovasti paketista, välttämällä koskettamasta sen kärkeä. Aseta näytetikun valkoinen, pehmeä kärki kohdunkaulakanavaan ja pyöritä tikkua n. 15 - 30 sekuntia riittävän näytemäärän varmistamiseksi.
3. Poista näytteenottotikku varovasti.
4. Avaa näyteputken korkki. Käsittele avointa putkea aseptisesti, välttämällä koskettamasta putken kärkeä ja korkin sisäpintoja.
5. Laita näytetikku näyteputkeen (valkoinen, pehmeä kärki tulee putken alaosaan kohti).
6. Katkaise näytetikku varovasti merkitystä katkaisukohtasta, varoen roiskuttamasta putken sisältöä.
7. Sulje putken korkki huolellisesti.

8. Kiinnitä putkeen pyyntötarra.
9. Laita kuljetusputki muovipussiin.
10. Säilytä kuljetusputki huoneenlämmössä.

Laadittu 1.4.2021/MKL.