

## Komplementti- ja immunokompleksitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Tutkimus	Näytemäärä	Näytteenotto ja lähetysohje	Erikoisputki/määrä
P-C1InhBk (6090)	Sitraatti-plasmaa  2 x 0,5 ml	Sitraattiplasma, näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (30 min sisällä näytteenotosta). Plasma erotetaan ja jaetaan kahteen osaan. Erotuksen jälkeen välitön pakastus, lähetetään hiilihappojäissä.  Lipeeminen tai hemolysoitunut näyte ei kelpaa.	2,7 ml Na - sitraattiputki
P-C1Inh (1209)	Sitraatti-plasmaa  2 x 0,5 ml	Sitraattiplasma, näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (30 min sisällä näytteenotosta). Plasma erotetaan ja jaetaan kahteen osaan. Erotuksen jälkeen välitön pakastus, lähetetään hiilihappojäissä.  Lipeeminen tai hemolysoitunut näyte ei kelpaa.	2,7 ml Na - sitraattiputki
P-HAE (235)	Sitraatti-plasmaa  2 x 0,5 ml  Seerumia  1 x 1 ml	Sitraattiplasma, näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (30 min sisällä näytteenotosta). Plasma erotetaan ja jaetaan kahteen osaan. Erotuksen jälkeen välitön pakastus.  Seerumi kylmäseparoitetaan (+4 C) mahdollisimman nopeasti (30 min seisoituksen jälkeen). Seerumi erotetaan ja pakastetaan välittömästi.  Seerumi ja plasma lähetetään hiilihappojäissä.  Lipeeminen tai hemolysoitunut näyte ei kelpaa.	2,7 ml Na - sitraattiputki  5 ml seerumiputki (ei geeliputki)

Tutkimus	Näytemäärä	Näytteen otto ja lähetys	Erikoisputki/ määrä
S-CH100 (4941)	Seerumia 1 x 1 ml	Seerumi kylmäseentrifugoidaan (+4 C) mahdollisimman nopeasti (30 min seisotuksen jälkeen). Seerumi erotetaan ja pakastetaan välittömästi. Lähetetään hiilihappojäissä.  Lipeeminen tai hemolysoitunut näyte ei kelpaa.	5 ml seerumiputki (ei geeliputki)
S-C-Def (11887)	Seerumia 1 x 1 ml  EDTA- plasmaa 2 x 1 ml	Seerumi kylmäseentrifugoidaan (+4 C) mahdollisimman nopeasti (30 min seisotuksen jälkeen). Seerumi erotetaan ja pakastetaan välittömästi.  EDTA-plasma, näyte seentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti (30 min sisällä näytteenotosta). Plasma erotetaan ja jaetaan kahteen osaan. Erotuksen jälkeen välitön pakastus.  Seerumi ja plasma lähetetään hiilihappojäissä.  Lipeeminen tai hemolysoitunut näyte ei kelpaa.	5 ml seerumiputki (ei geeliputki)  10 ml EDTA- putki
S-CIC (3050)	Seerumia 2 x 0,5 ml	Seerumi kylmäseentrifugoidaan (+4 C) mahdollisimman nopeasti (30 min seisotuksen jälkeen). Seerumi erotetaan ja jaetaan kahteen osaan. Erotuksen jälkeen välitön pakastus, lähetetään hiilihappojäissä.	5 ml seerumiputki (ei geeliputki)

20.1.23/KR