

## Kuumavesialtaan puhdistus

Kuumavesialtaita käytetään toimintaterapeuttien lastamateriaalin pehmentämiseen. Altaassa oleva vesi lämmitetään 65-75 asteiseksi. Allas tyhjennetään ja puhdistetaan toimintapäivinä toiminta-ajan ulkopuolella. Altaan vesi tulee olla jäähtynyt, ennen puhdistamista.

1. Tyhjennä kuumavesialtaasta vesi pois. Altaan vasemmassa sivussa on musta kahvainen vedettävä tai käännettävä vipu. Vipu saattaa olla tiukka.
2. Altaasta poistetaan ritilä.
3. Tee puhdistusaineliuos heikosti emäksisestä puhdistusaineesta.
4. Kuumavesiallas puhdistetaan sisäpuolelta mikrokuituisella tasopyyhkeellä. Tarvittaessa allas harjataan.
5. Ritilä pestään lavuaarissa astiaharjalla.
6. Kuumavesiallas suljetaan vasemmalla puolella sijaitsevasta vivusta.
7. Allas täytetään uudella vedellä n. 2cm altaan yläreunasta.



Kuva 1. Kuumavesiallas