
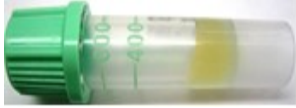




## Mikroputket ja yleisimpien tutkimusten minimimäärät

Laajemman tutkimuskohtaisen ohjeistuksen miniminäytemääriin löydät Tykslabin ohjekirjasta, yleisohjeista: [Ohjeita näytemääristä erikoistapauksia varten](#)

Mikroputket ovat taulukossa näytteenottojärjestyksessä.

Näyteputki	Tutkimus	Tarvittava minimiverimäärä
* sekoita kääntämällä ylösalaisin rauhallisesti 8 kertaa niin, että näyte kulkee putken reunoja pitkin.		
 <b>901808</b> mikro-EDTA-putki, turvakorkilla *	<ul style="list-style-type: none"> <li>B-PVK+T, B-Diffi, B-Retik</li> <li>E-ABO-Rh ja/tai E-Coomb-O</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota alimpaan merkkiviivaan asti (0,250ml)</li> <li>Ota alimpaan merkkiviivaan asti (0,250ml)</li> </ul>
EDTA-putki *	<ul style="list-style-type: none"> <li>B-XKoe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota 1 ml laskimosta</li> </ul>
EDTA-putki *	<ul style="list-style-type: none"> <li>fP-NH<sub>4</sub>-ion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota 0,5 ml laskimosta</li> </ul>
 <b>901806</b> mikrogeelihepariiniputki *	<ul style="list-style-type: none"> <li>P-AFOS, P-ALAT, P-Alb, P-ASAT, P-Bil, P-Bil-Kj, fP-Ca, P-CK, P-CRP, P-GT, fP-Insu, fP/P-Gluk *, P-K, P-LD, P-Na, P-Mg, fP-Pi, P-Krea, P-Uraat, fP-Urea, P-Korsol, fP-C-Pept, P-TSH, P-T4V</li> <li>* lasten näytteet, toimitus laboratorioon kylmägeelien välissä ja sentrifugointi 30 min kuluessa.</li> <li>Yksittäinen tutkimus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota mikroputki täyteen (0,7ml)               <ul style="list-style-type: none"> <li>yhdestä täysinäisestä mikroputkesta saadaan noin 10 määritystä.</li> </ul> </li> <li>Ota alimpaan merkkiviivaan asti (0,4 ml)</li> </ul>
 <b>910195</b> mikroseerumiputki * täysi putki = 0,7 ml	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lääkeainepitoisuudet:</li> <li>S-Digoks, S-Fenob, S-Fenyt, S-GEN, S-Karba, S-MTX, S-Teofy, S-TOB, S-Valpr, S-VAN</li> <li>uS-TSH * (napaseerumin TSH)</li> <li>fS-GH *</li> <li>* ota näyte mieluiten laskimosta geeliseerumiputkeen</li> <li>S-MonAb-0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota 2 x mikroputki (1 ml)</li> <li>Ota 1 x mikroputki (0,5 ml)</li> <li>Ota 2 ml (tai 3 x täysi mikrop.)</li> <li>Ota 1 ml (tai 3 x mikroputki)</li> <li>Ota 1 x mikroputki (0,5 ml)</li> </ul>
 <b>936732</b> Multivette® 600 FH 15.1672 Fluoride Heparin/Glucose 0,6 ml *	<ul style="list-style-type: none"> <li>fP-Laktaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota mikroputken näytteenottoputki täyteen (= 0,6 ml)</li> </ul>