
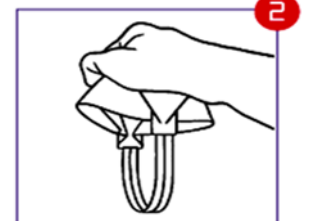


## Användning av andningskydd

(FFP2 eller FFP3) FF=filtering facepiece (filtrerande ansiktsmask), P=particle (partikel)

- Följ alltid tillverkarens anvisningar (på förpackningen)
- Kontrollera på förpackningen att "användes före"-datumet inte har gått ut.
- Håll skyddet i handen och dra ut den nedre delen för att göra skyddet skålformat.
- Dra fram gummispännbanden.
- Sätt skyddets nedre del under hakan. Dra båda gummibandet över huvudet.
- Sätt det nedre gummibandet bakom nacken under öronen. Sätt det övre gummibandet över hjässan i 45 graders vinkel. Justera skyddets övre och nedre del tills det sitter bekvämt.
- Forma näsklipset enligt näsans form med båda händerna. Knip **inte** ihop näsklipset med enbart två fingrar, då detta kan medföra att skyddets prestanda försämras.

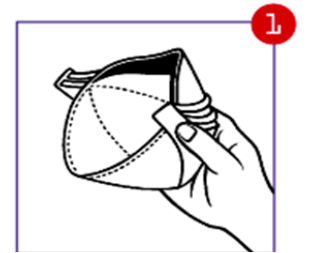

### Skyddets täthet mot ansiktet måste kontrolleras före användning.

- Om skyddet är utrustat med en utandningsventil, dra ett djupt andetag. Täck ventilen med handen och blås kraftigt. Känn efter med handen längs med skyddets sidor för luftläckage.
- Om skyddet inte har en utandningsventil, andas kraftigt. Vid inandning dras skyddet inåt mot ansiktet. Vid utandning känner du luftläckage runt skyddet.
- Skyddet läcker om du känner luftflöde i ansiktet vid t.ex. näsan eller under känen. Justera skyddet bättre mot ansiktet och prova igen.
- Byt vid behov till en annan storlek eller till ett andningskydd av annan modell.

## Borttagning av andningsskydd



1. Desinficera händerna.  
Låt medlet torka



2. Ta på skyddshandskarna



3. Bryt gummibanden vid fästet.  
Undvik att vidröra skyddets framdel.



4. Ta av skyddet varsamt och kontrollerat.



5. Sätt det använda andningsskyddet direkt i ett lockförsett sopkärl.



6. Ta av skyddshandskarna och desinficera händerna.